

소금.
얼마나 먹는지 알아야
얼마나 줄일지 알 수 있습니다.

소금섭취량검사

**Salt
Signal**



Urine Salt Test Strip

DNA 동남메디칼


경기도 고양시 일산동구 정발산동 1176-1 서교빌딩 2층
Tel: 031) 908-7588 www.dnamed.co.kr

SaltSignal(솔트시그널)은 섭취한 음식중 하루의 소금양을 소변으로 간단하게 측정할 수 있습니다.

솔트시그널 사용법


미리 화장지를 두 번 접어 평평한 곳에 두고 소변 컵에 소변을 받는다.
솔트시그널 하나를 꺼내고 용기의 뚜껑은 제대로 닫는다.

1.

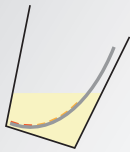



솔트시그널을 약 1초간 소변에 완전히 담갔다가 꺼낸 후 2초 동안 기다린다.

2.

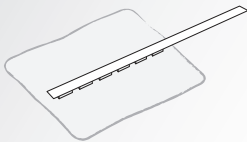

그림처럼 화장지에 약 5초간 가볍게 눌러 잔뇨를 흡수시키고 화장지는 버린다.

3.

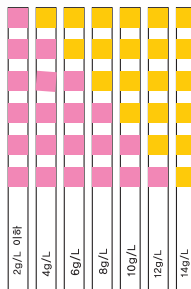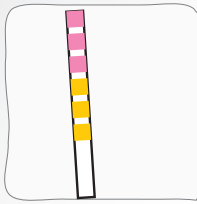

1분 후 왼쪽 판독표를 보고 확인한다.



제품의 구성

- ① 소금섭취량 소변측정 시험지 100 tests
- ② 사용설명서

- o 교육 및 행사 등에 사용하기 편하게 2 or 3 테스트 포장으로 생산이 가능합니다.
- o 주문 수량에 따라 보건소명, 기타문구등을 디자인하여 제작할 수 있습니다.

