


솔트시그널 사용법


미리 화장지를 두 번 접어 평평한 곳에 두고 소변 컵에 소변을 받는다.
솔트시그널 하나를 꺼내고 용기의 뚜껑은 제대로 닫는다.

1.

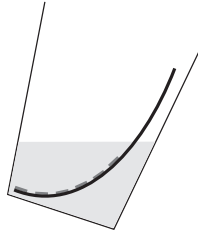

솔트시그널을 약 1초간 소변에 완전히 담갔다가 꺼낸 후 2초 동안 기다린다.

2.

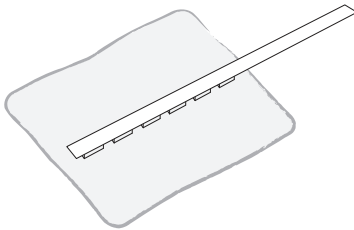

그림처럼 화장지에 약 5초간 가볍게 눌러 잔뇨를 흡수시키고 화장지는 버린다.

3.



1분 후 왼쪽 판독표를 보고 확인한다.

※검사 전 주의사항

영양제(비타민C)를 복용하면 STRIP의 전체가 진한갈색으로 변하여 검사결과의 오류가 발생합니다. 검사 전 영양제 복용여부를 확인하신 후 진행해야 하며, 영양제 복용 후 약 24시간이 지나면 검사가 가능합니다.

※판독시 주의사항

판독시에는 STRIP의 한칸 한칸이 완벽하게 노란색으로 변한 것만 인정합니다.

3번째 칸까지는 완벽하게 변했고, 4번째 칸은 3/4정도만 노란색이고 분홍색 점이 조금이라도 남아있다면 그 칸은 변하지 않은 것입니다. 위의 결과는 3칸만 변한 것으로 인정되어 일일 12g정도로 판정하시면 됩니다.